

MONTERINGS- ANVISNING

EVOFLEX HOFTEBELTE

KIT 45021 xs, 82788 M, 82789 L

til DYNAMISK SETEPLATE

Enable joy of life

EVOFLEX KIT

45021 xs, 82788 M,
82789 L

**For montasje på
Dynamisk seteplate på
Netti dynamisk rullestol.**

Beltesettene består av beltet - 2 deler




+ 2 mutter og 2 skruer:




Den dynamiske seteplaten kommer med 2 skinner montert på sidekantene på undersiden av platen.

Det er montert ett beslag for å feste beltet i hver skinne.

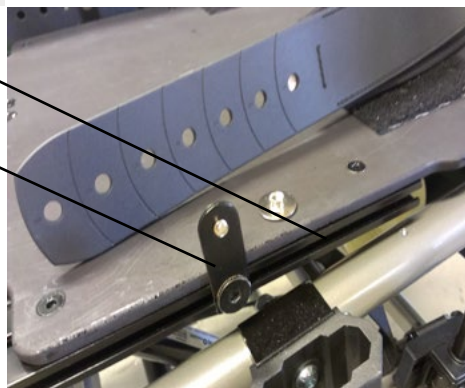

Skruen fra Evoflex-settet skyves gjennom det øvre hullet i belte-feste-beslaget - utover fra seteplaten.

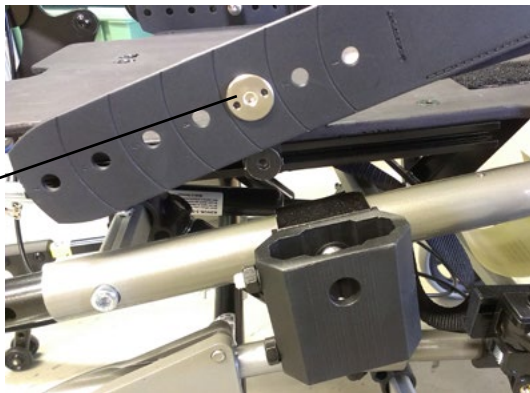

Mutteren skyves gjennom det hullet i beltet som gir riktig lengde for brukeren.

Mutteren skrues fast til skruen som sitter i belte-feste-beslaget på setteplaten, og strammes godt. Mutteren og skruen er så lange at beltet kan svinge fritt når skruen og mutter er strammet.



Med beltet montert på skinnen på setteplaten kan platen svinge opp og følge med når brukeren strekker seg.

Juster plasseringen av beltet. Det skal være plassert så langt fremme på skinnen at beltet går på tvers over brukerens lår og ikke klemmer vitale deler.



GJENNOM DIALOG SKAPER VI ENKEL LØSNINGER OG ØKER LIVSGLEDEN

CE Dette produktet er i samsvar med 93/42/EEC
for medisinske hjelpemidler.

MD0133NO
2017-02

TA GJERNE KONTAKT:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY

T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
info@My-Netti.com

My-Netti.com