

MONTERINGSANVISNING

Multistativ

Artikkelnummer : 41987

Ved montering og bruk av stativet er det viktig å sikre stolens balansepunkt. Dette gjøres ved bruk av anti-tip, eventuelt også rammeforlenger ved stor tyngde.

Den maksimale uttrekkshøyden er 195 cm (dørhøyde).

Inneholder:

Holder i sort kunststoff

Teleskopstativ i aluminium

Knekkledd med utløser-/låsegrep

Holder med friksjonsbånd, passende til Ø 19, 20, 22, 23 og 25 mm

Monter holderen (1) på stolens skyvebøyle. For å unngå at stativet roterer, legg friksjonsbåndet mellom skyvebøyle og aluminiumsklemmen. Monteringen gjøres ved hjelp av umbracoskruene (A) på undersiden av holderen – skru deretter skruene så fast at holderen ikke kan dreies. Bør ettertrekkes etter en uke.

Stikk teleskopstativet (2) i holderen – dreid det til det har den ønskede posisjon og lås det med stjerneskrue (B) Ved hjelp av knekkleddet kan multistativet settes i loddret stilling. Trykk på utløserknappen (D) i knekkleddet – dreid stativet til det har den rette vinkel og lås igjen ved å slippe knappen.

Den sorte ringen (E) vrir mot klokken for å frigjøre den øvre delen og tillater høydejustering. Ringen vrir med klokken for å låse når ønsket høyde er funnet.

Stativet kan fjernes ved å trykke på utløserknappen (C).

