





Monteringsanvisning Sidestøtte Stabil

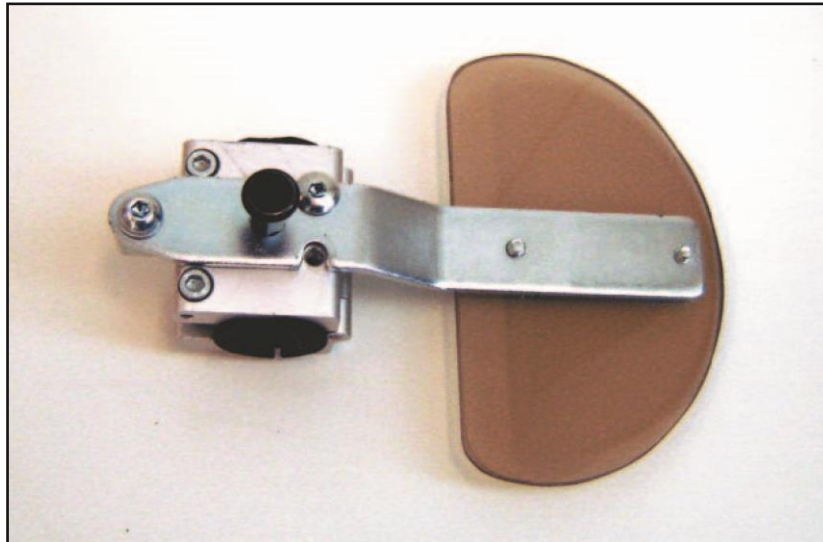

Artikkel	Artikkelnummer
Sidestøtte Stabil Venstre	26830
Sidestøtte Stabil Høyre	26843

Verktøy: 6 mm Unbrakonøkkel og en skarp kniv.

Skru ut de 2 skruene som holder sidestøtteklemmen sammen og åpne klemmen

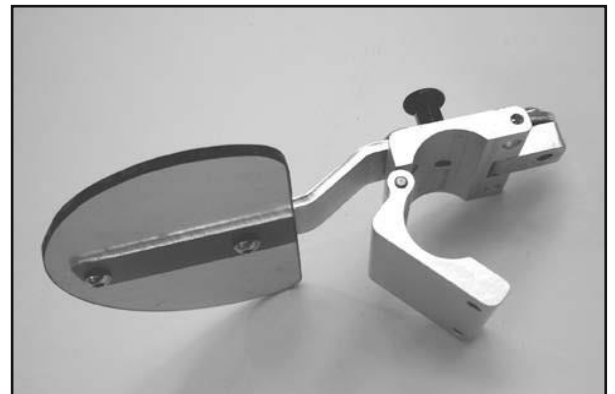

Hvis sidestøtten skal monteres på en stol med firkantet ryggrør, brukes den vedlagte plastforingen.





Etter tilpassing av ryggputen, finn den riktige høyden for sidestøtten. Støtten skal stå parallelt med sidestøtten i ryggputen. Skjær deretter ut et stykke av Velcro ryggen slik at klemmen får plass rundt ryggrøret.

Ved montering på firkanttrør, plassere først den vedlagte plastforingen rundt ryggrøret.



Monter klemmen og før skruene strammes til må vinkelen på sidestøtten bestemmes. Avhengig av vinkelen på sidestøtten gir denne mer eller mindre stabilitet til ryggputens sidestøtter.



For å løsne sidestøtten trekkes utløserhendelen ut.

