

BRUKERMANUAL OG MONTERINGSANVISNING NETTI NATURE



Designet i Norge

CE Dette produktet er i samsvar med
93/42/EØF for medisinske hjelpemidler.

Enable joy of life



Netti Nature - et tilbehør for din rullestol som gir økt tilgjengelighet og framkommelighet i ulendt terreng.

DEN ER SKREDDERSYDD TIL DITT BEHOV.

BRUKERMANUAL:

Bruk et par minutter å sette deg inn i denne brosjyren som viser hvordan Netti Nature skal monteres og brukes, slik at du får størst mulig glede av utstyret.

Det lønner seg også å gå gjennom brukermanualen for selve rullestolen for å bli kjent med og friske opp anbefalinger for bruk og vedlikehold.

NETTI NATURE er en ramme-arm med hjul som festes til rullestolens ramme.

Med Netti Nature påmontert vil man kunne ta seg fram i ulendt terreng hvor en rullestol med vanlig små styrehjul ikke lar seg kjøre. Netti Nature bidrar til at også rullestolbrukere kan være med på tur i fri natur.



NETTI NATURE leveres som et sett bestående av:

- ◆ Netti nature rammen med ett 12 1/2" x 2 1/4" Flexel punkteringsfritt fronthjul.
- ◆ Avstivingsbrakett som settes i venstre fremhjuls lagerhus.



I tillegg kommer festebraketten som skal skrues fast til rullestolens ramme.

Den består av:


- ◆ hoveddel med hengsle og låseratt

Til fremre innfesting:

- ◆ 2 bøyer
- ◆ 4 underlagsskiver
- ◆ 4 stk M6 låsemuttere

Til bakre innfesting:

- ◆ 2 klemmer
- ◆ 4 stk M6 x 16 Unbrako skruer
- ◆ 4 stk M6 låsemuttere

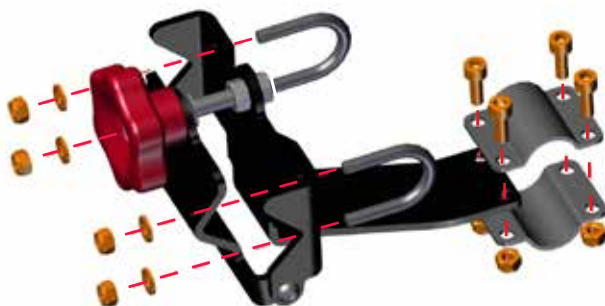

MONTERING AV INNFESTINGS- BRACKETTEN TIL NETTI NATURE.

Fjern benstøttene for enklere tilgang til rullestolens ramme.


♦ Legg begge bøyene til innfestningsbraketten bak det fremre tverrøret på rullestolens hjulramme.


♦ Skru fremre del av innfestningsbraketten til bøyene med 4 stk M6 låsemuttere, som vist på illustrasjonen.

Vent med å stramme mutterne til den bakre delen av innfestningsbraketten er festet.



10 mm fastnøkkel

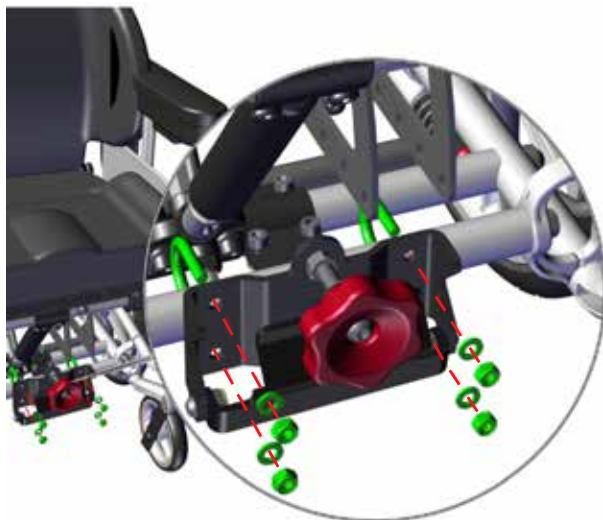

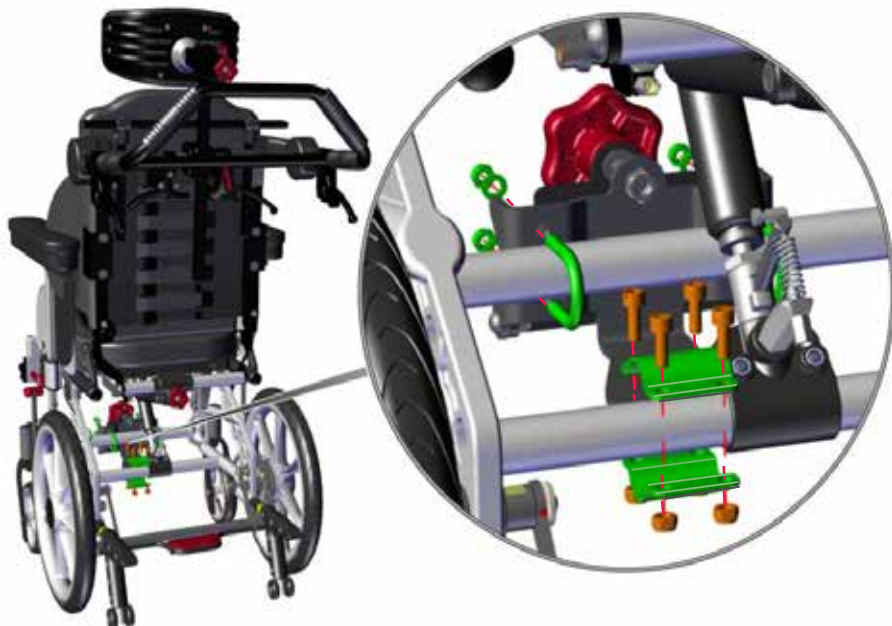

- ◆ Fest bakre del av innfestingsbraketten til bakre tverrør på hjulrammen, direkte ved siden av gassfjærens beslag.
- ◆ Tre 2 M6 x 16 unbrakoskruene gjennom øvre rørklemme, gjennom innfestningsbraketten og nedre rørklemme som vist på illustrasjonen.
- ◆ Fest med 2 stk M6 låsemuttere.
- ◆ Tre de siste 2 M6 x16 unbrakoskruene gjennom øvre og nedre rørklemme og fest med 2 stk M6 låse muttere.
- ◆ Stram mutterne både på den fremre og bakre braketten.




5 mm unbrakonøkkel og
10 mm fastnøkkel.

BRUKSANVISNING FOR NETTI NATURE

- ◆ Sett bremsene på.
- ◆ Skyv tverrstaget på Netti Nature inn i feste braketten.
- ◆ Pass på at fronthjulet blir stående sentrert på stolen.



- ◆ Stram det røde stjernehjulet slik at Netti Nature sitter godt fast.

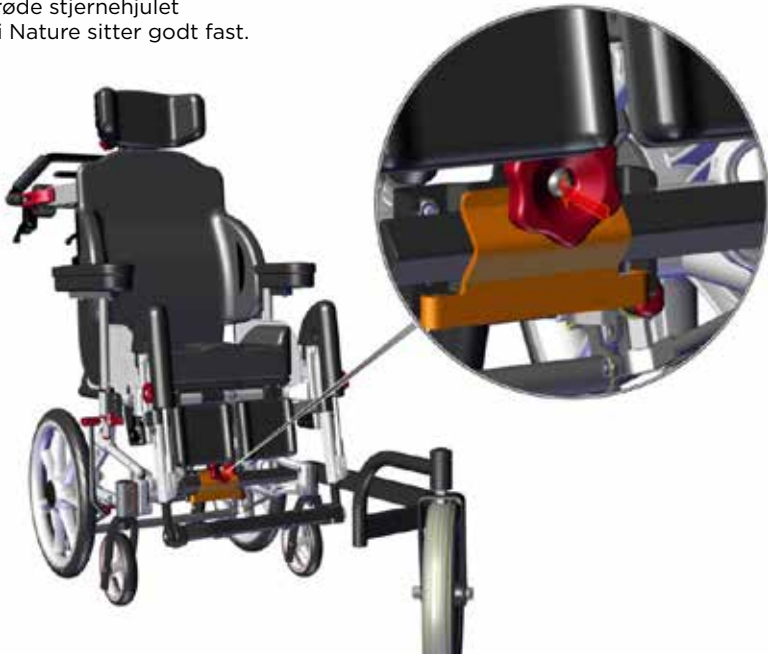



- ◆ Vipp rullestolen litt bakover slik at stolens styrehjul henger fritt.
- ◆ Trykk inn hurtiglåsen på styrehjulene og fjern begge styrehjul.



- ◆ Trykk inn hurtiglåsen i avstivingsbraketten og før den inn i venstre fremhjuls lagerhus.
- ◆ Sving avstivingsbraketten til venstre mot Netti Natur rammearm. Løft litt i rammen til braketten griper rundt rammearmen.
- ◆ Stram stjernehjulet.



- ◆ Ved endt tur reverseres monteringen.

ANBEFALINGER:

- ⚠ Brukeren bør ha setebelte på når det kjøres i terrenget for å unngå at brukeren glir ut av stolen.
- ⚠ Kjør forsiktig.
- ⚠ Sørg for å gjøre Netti Nature og rullestolen ordentlig ren etter en tur i terrenget.
- ⚠ Netti Nature er ikke beregnet for at noen står på ramme-armen.
- ⓘ Lengden på rammearmen på Netti Natur er tilpasset at dynamiske benstøtter kan svinges ut og fram uten å kolliderer med rammen.





GJENNOM DIALOG SKAPER VI ENKEL LØSNINGER OG ØKER LIVSGLEDEN

Oppdateringer, brukermanualer og informasjon om våre produkter kan du finne på vår hjemmeside:

www.My-Netti.no



Dette produktet er i samsvar med 93/42/EØF for medisinske hjelpemidler.

MD0144NO
2018-03

TA GJERNE KONTAKT:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY

T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
DENMARK

T: +45 87 88 73 00
info@My-Netti.com

My-Netti.no

